

* * 2007年5月30日改訂(第3版)

* 2007年1月29日改訂(第2版)

* 届出番号 11B3X00042000019

歯科材料 09 歯科用研削材料
* 一般医療機器 歯科用研磨器材 * JMDN70907000

スーパースター

【形状・構造及び原理等】

形状：軟質固形体

組成：酸化アルミニウム、ダイヤモンド、脂肪酸等

色調：薄灰色

* 原理：研磨用ブラシまたはパフに付着させることで研磨できる。

* 【使用目的、効能又は効果】

補綴物等の研磨に用いる器材

* 【品目仕様等】

[性能]

項目	粉末度残量(%)
標準ふるい 420µ	残量 0%
標準ふるい 149µ	残量 1%以下

[用途]

- ・ポーセレン専用最終艶出し研磨
- ・キャストブルセラミック、ハイブリッド系硬質レジンの艶出し研磨にも対応

* 【操作方法又は使用方法等】

- (1) 前の仕上げ研磨工程で、「販売名：スーパーカラーポイント、届出番号：11B3X00042000021」(Y15/R7/G4)を使用し、ポーセレン表面の傷を取り除き滑沢に仕上げておく必要があります。
- (2) 低速回転で硬質フェルトホイール、フェルトポイント、ポリッシングブラシ等に本材を付着させます。
- (3) 通常回転に戻し、ポーセレン表面がグレージングと同等な光沢が出るまで、発熱に注意しながら丁寧に研磨を行って下さい。
- (4) 最後に本材が付着していないフランチャーホイールを用い、ポーセレン表面を軽く研磨しますと、より一層光沢が得られます。
- (5) 本材での最終艶出し研磨終了後は、中性洗剤を用い 45 程のお湯で、被研磨物を十分洗浄して下さい。

* 【使用上の注意】

(1) 重要な基本注意

- ・本材が目に入らないように注意すること。万一目に入った場合

は、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。

(2) 使用注意

- ・本材を使用する際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
- ・本材の研削、研磨の際には、目の損傷を防ぐため、保護めがねなどを使用すること。
- ・研磨作業後は、石鹸をつけたブラシ等で十分な手指の洗浄を行うこと。
- ・本材の使用により、発疹などの過敏症状が現れた際は、使用を中止し、速やかに医師の診断を受けること。
- ・本材に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある方は使用しないこと。
- ・他の製品との混用は避けること。
- ・本材は、歯科用研磨器材の用途以外には使用しないこと。

* 【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

[貯蔵・保管方法]

- ・出来るだけ高温多湿の場所を避けて保管すること。

[有効期間・使用の期限]

- ・通常の貯蔵方法であれば、長期保存による、品質変化は無いため、使用期限は定めない。

製造番号は(LOT.No)により表示してあります。

【包装】

[内容量(質量)および包装材]

NET. 7g (プラスチック容器入) / 函

* * 【製造販売業者又は製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業：下村石膏株式会社

住 所：〒351-0015

埼玉県朝霞市幸町 3-11-9

電話番号：048-464-0011

FAX番号：048-467-5118

販売業：(株)日本歯科工業社

住 所：〒110-8530

東京都台東区上野 5-12-8

電話番号：03-3836-2191

FAX 番号：03-3836-2377